

妊娠検査薬

一般用検査薬

第2類医薬品

一般用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモンキット

承認番号 308AFEZX00030000

KBM ラインチェック hCG



からだの変化が
気になる時に

初めての方でも簡単

1 Step

もしかして?と思ったら...

ご自身のタイミングで
簡単に検査できます!

妊娠反応あり

陽性



妊娠反応なし

陰性



見やすい判定窓

生理予定日の約1週間後から

正確性99%以上




コージンバイオ株式会社

使用方法

◎ 生理予定日の約1週間後から検査できます。 ◎ 朝・昼・夜いつの尿でも検査できます。


- 1** 検査直前にテストスティックをアルミ袋から取り出し、キャップを外してください。

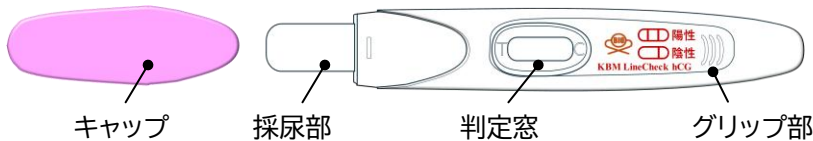

- 2** 採尿部を下に向けて、採尿部全体に尿を5秒間かけてください。

5秒


判定窓に尿をかけないでください。

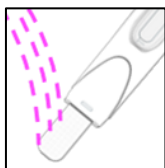

(カップ等に採尿する場合)
乾いた清潔なカップに採尿し、採尿部全体を尿に10秒間浸けてください。

10秒

採尿部以外を尿に浸けないでください。

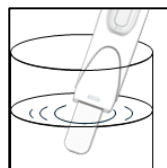


- 3** キャップを装着し、平らな場所に置き、1～3分待ってください。
判定窓を観察し、【確認部】にラインがあらわれていることを確認してから、判定を行ってください。



採尿部を水平より上に向けしないでください。

3分

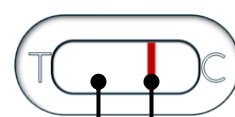

【判定部】 【確認部】

判定方法

- 判定窓にあらわれる赤色のラインの有無を観察し、下記の図と説明に従って判定してください。
- 3分待っても【確認部】にラインがあらわれない場合は、【判定部】にラインがあらわれていても新しいテストスティックで検査をやり直してください。

陽性		陰性	
判定窓に二本の赤色のラインがあらわれた場合。 ラインが薄くても二本の赤色のラインがあらわれたら陽性です。		判定窓の【確認部】のみに赤色のラインがあらわれた場合。	
妊娠反応が認められました。妊娠している可能性があります。出来るだけ早く医師の診断を受けてください。		今回の検査では妊娠反応は認められませんでした。生理が始まらない場合は、数日後に再検査するか、医師に相談してください。	

キットの内容及び成分・分量・検出感度

【内容】

- 1回用:テストスティック 1本
2回用:テストスティック 2本
3回用:テストスティック 3本

【成分・分量】

(テストスティック1本中)
金コロイド標識抗hCGモノクローナル抗体(マウス) …1.60 μ g
抗hCGポリクローナル抗体(ヤギ) …0.65 μ g

【検出感度】

50 mIU/mL

使用目的

尿中のヒト絨毛性性腺刺激ホルモン(hCG)の検出
(妊娠の早期検査)

保管方法・有効期間

保管方法:室温保管(2～30℃)
有効期間:36ヶ月(使用期限は外箱に記載)

	製品コード	外装サイズ	JANコード
1回用	82011	190×60×22 mm	4987692820115
2回用	82012	190×60×22 mm	4987692820122
3回用	82013	190×60×35 mm	4987692820139

お問い合わせ先

女性スタッフがご質問・ご相談に応じます

コージンバイオお客様相談室
0120-671-210

受付時間:10:00～17:00(土・日・祝日を除く)

【製造販売元】

コージンバイオ株式会社

〒350-0214 埼玉県坂戸市千代田5丁目1番地3



KOHJIN BIO