

TECHLAB®

DISTINCT RESULTS

# 赤痢アメーバ QUIK CHEK

迅速で明快な結果提供により、  
より良い患者ケアに貢献します

- 非病原性の *E. dispar* と交差反応することなく、  
*E. histolytica* を特異的に検出します
- 不適切な治療や不必要な抗生物質投与を  
未然に防ぎます
- 30分で結果が判明します

体外診断用医薬品

製造販売承認番号 30200EZX00054000

販売名	赤痢アメーバ QUIK CHEK
一般的名称	赤痢アメーバ抗原キット
製品コード	902304091
包装単位	25テスト / 箱
有効期限	製造後18ヵ月
貯蔵方法	2 ~ 8°C
適応検体	新鮮便、凍結便、輸送培地 (キャリアブリア培地またはC&S)
測定時間	30分以内
測定原理	EIA法



赤痢アメーバ QUIK CHEK

# 赤痢アメーバ QUIK CHEK

## 操作方法


1

試験管に下記試薬を添加

- ・ 希釈液 (Diluent) 500  $\mu$ L
- ・ 酵素標識抗体 (Conjugate) 1滴
- ・ 検体 25  $\mu$ L

(ピペットの1番目のマークまで)


その後十分に混和させます。

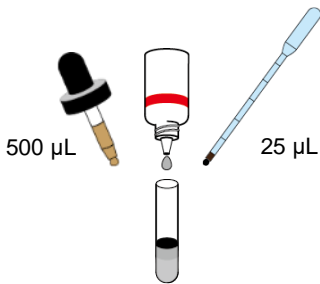

2

新しいピペットで調整液


500 $\mu$ L(ピペットの1番上のマークまで)を検体添加部へ添加し、室温で15分間静置します。

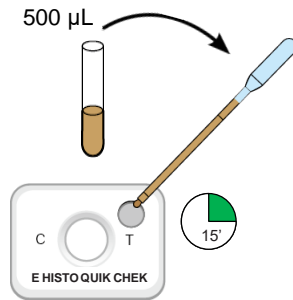

3


洗浄液 (Wash Buffer)

300 $\mu$ Lを判定部に滴下し、十分に吸収させます。

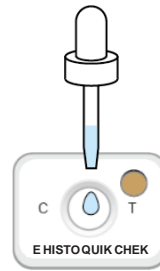

4

基質液 (Substrate) 2滴を判定部に滴下し、10分後に結果を読み取ります。

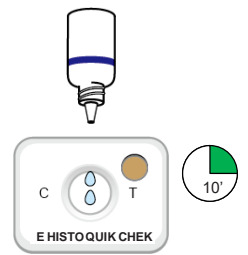

## 製品特徴

- ・ 30分で判定可能
- ・ 広く使用されているTECHLAB® QUIK CHEK™シリーズ
- ・ 読み取りやすい検査結果

(その他追加事項については添付文書を参照してください)



陽性反応



陰性反応



販売元

製造販売元

製造元



コージンバイオ株式会社

〒350-0214 埼玉県坂戸市千代田5-1-3  
TEL:049-284-3781 FAX:049-284-4784

URL : <https://kohjin-bio.jp/>

パシフィックブリッジメディカル株式会社

〒105-0021  
東京都港区東新橋 2-10-10 東新橋ビル



PROVEN DIAGNOSTIC PERFORMANCE

[www.techlab.com](http://www.techlab.com)