

適用検体に **鼻腔ぬぐい液** が追加されました

この度、SARSコロナウイルス抗原キット『KBM ラインチェック nCoV(スティックタイプ)』の適用検体に、鼻腔ぬぐい液が追加されましたのでご案内申し上げます。


操作手順

検体採取時には、標準予防策等の必要な感染防御措置を施してください。



鼻腔ぬぐい液の場合


(医療従事者の管理下で被検者自身が検体採取可能)

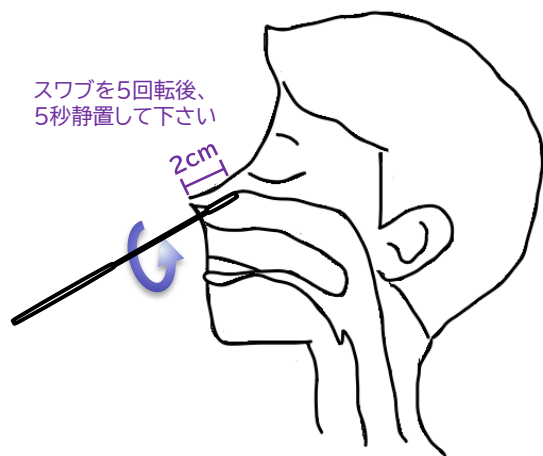

鼻孔の方向で鼻腔に沿って2cm程度ぬぐい棒(キット付属品:滅菌綿棒)を挿入し、鼻甲介付近をゆっくり5回程度回転させ、5秒程度静置し、採取します。


鼻咽頭ぬぐい液の場合

(医療従事者による採取が必要)

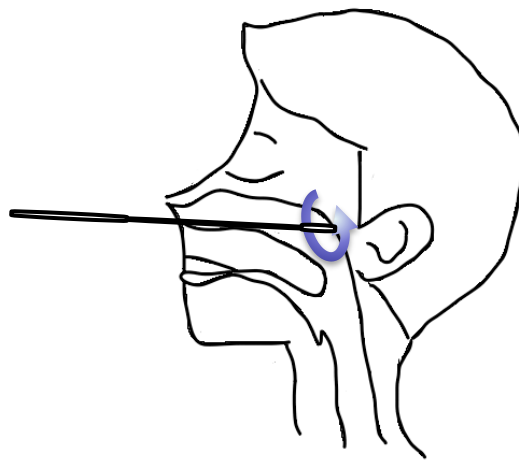


滅菌ぬぐい棒(キット付属品:滅菌綿棒)を鼻腔底に沿って挿入し、抵抗を感じたところで止め、10秒程度そのままの位置で鼻汁を浸透させ、採取します。


以降の操作は、鼻腔ぬぐい液・鼻咽頭ぬぐい液で共通です。

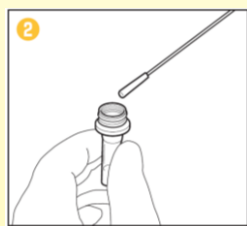


検体を採取した綿棒を抗原抽出液に浸す。

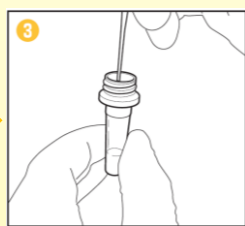

よく攪拌する。

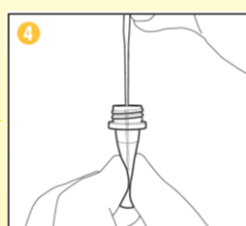

よく攪拌した後、抗原抽出液チューブをつまみ、綿棒を引き抜く。

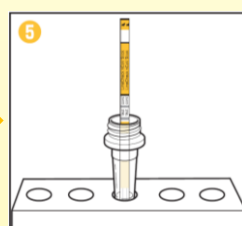

テストスティックを垂直に浸す。



10分後 判定

製品情報

【キット概要】 ご使用の際は、添付文書をよくお読みください。

品名	KBMラインチェックnCoV(スティックタイプ)
製品コード	80210
包装単位	10テスト
測定原理	免疫クロマトグラフ法
有効期限	製造後6ヶ月間
貯蔵方法	2~30℃
判定時間	試料に浸漬1分後~10分
外装サイズ	W195×D124×H49(mm)



【お問い合わせ先】



KOHJIN BIO

コージンバイオ株式会社

〒350-0214 埼玉県坂戸市千代田5丁目1番地3
TEL: (049)284-3781(代) FAX: (049)284-4784
URL: <http://www.kohjin-bio.jp>